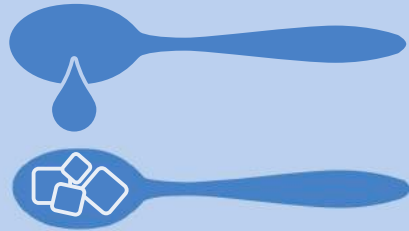
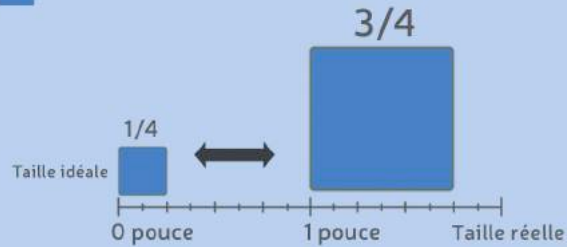
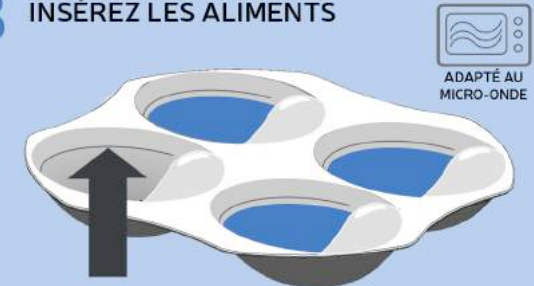


**1 SÉLECTIONNEZ LES ALIMENTS**

Liquides : soupes, céréales, boissons  
Semi-solides : flocons d'avoine, purée de pommes de terre, puddings  
Solides : fruits, légumes, viandes


**2 PRÉPAREZ LES ALIMENTS**

Obi est optimisé pour des aliments préparés dans les intervalles de tailles ci-dessus.


**3 INSÉREZ LES ALIMENTS**

Repère de remplissage maximum


Remplissez les bols avec les aliments. Un remplissage excessif n'est pas recommandé.

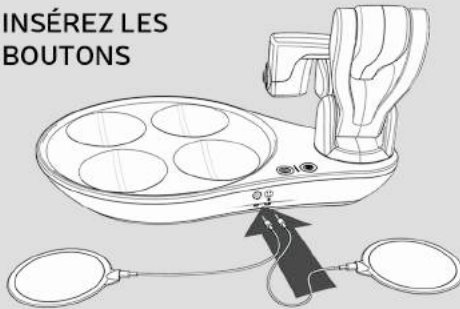**4 INSÉREZ LES BOUTONS**


Placez l'appareil sur une surface plate. Déplacez le bras vers la droite, comme indiqué. Insérez les contacteurs d'accessibilité souhaités.

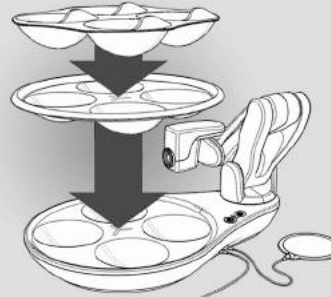**5 INSÉREZ L'ASSIETTE & LE SET DE TABLE**


Insérez le set de table coloré, placez ensuite l'assiette au dessus.

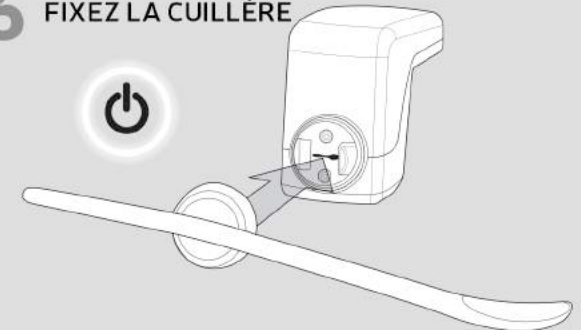**6 FIXEZ LA CUILLÈRE**

Fixez la cuillère et appuyez sur le bouton de démarrage.

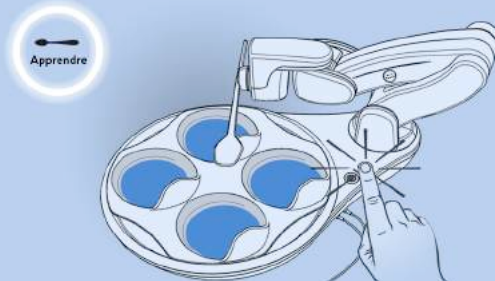**7 ENTREZ DANS LE MODE APPRENTISSAGE**

Appuyez sur le bouton d'apprentissage.

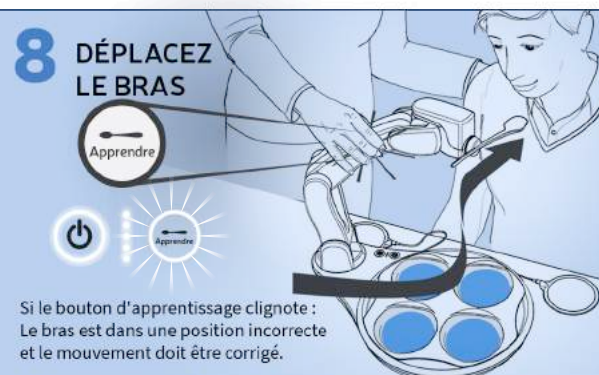
**8 DÉPLACEZ LE BRAS**

Si le bouton d'apprentissage clignote :  
Le bras est dans une position incorrecte et le mouvement doit être corrigé.

Saisissez le bras comme indiqué en recouvrant l'icone apprentissage avec l'un de vos doigts. Déplacez le bras pour le placer devant la bouche de l'utilisateur.


**9 QUITTEZ LE MODE APPRENTISSAGE**

Appuyez à nouveau sur le bouton d'apprentissage pour enregistrer la position et quitter le mode apprentissage.

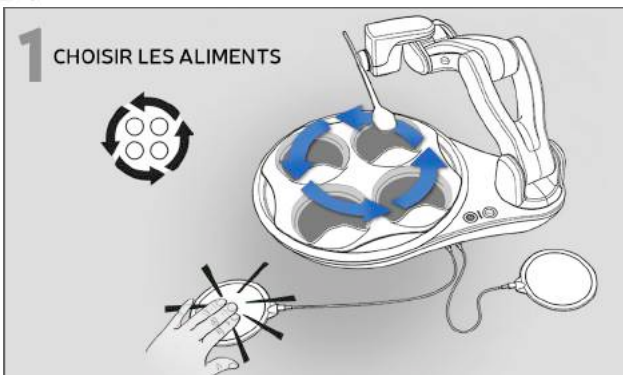

**1 CHOISIR LES ALIMENTS**

Le contacteur de choix déplace le bras d'un bol à l'autre à chaque fois qu'il est activé. Utilisez ce contacteur pour sélectionner le bol dans lequel vous souhaitez manger.

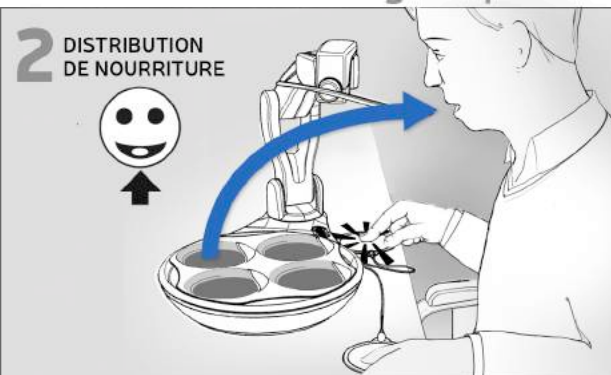


**2 DISTRIBUTION DE NOURRITURE**

Le contacteur de distribution prend et transporte les aliments jusqu'à la bouche de l'utilisateur.




**3 RETOUR À LA POSITION DE BASE DU BRAS**


Une fois que l'utilisateur a ingéré les aliments de la cuillère, appuyez sur le contacteur de distribution pour remettre la cuillère dans le même bol.

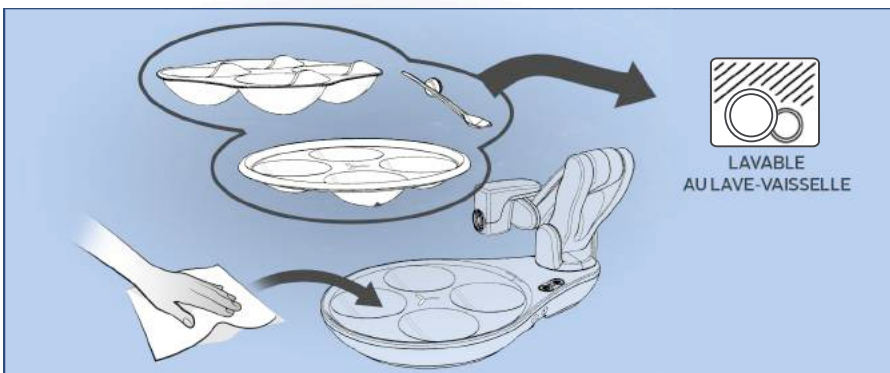


L'assiette, le set de table et la cuillère peuvent être nettoyés à la main ou au lave-vaisselle (dans le panier supérieur). N'essuyez la base et le bras d'Obi qu'avec un chiffon désinfectant ou un chiffon humide.

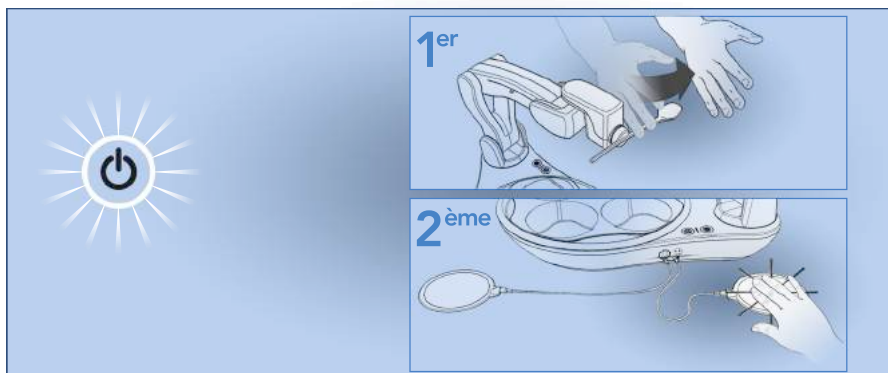

Si le bouton d'alimentation clignote, veuillez retirer l'objet obstruant. Une fois retiré, pressez l'un des contacteurs et le bras reprendra son mouvement.

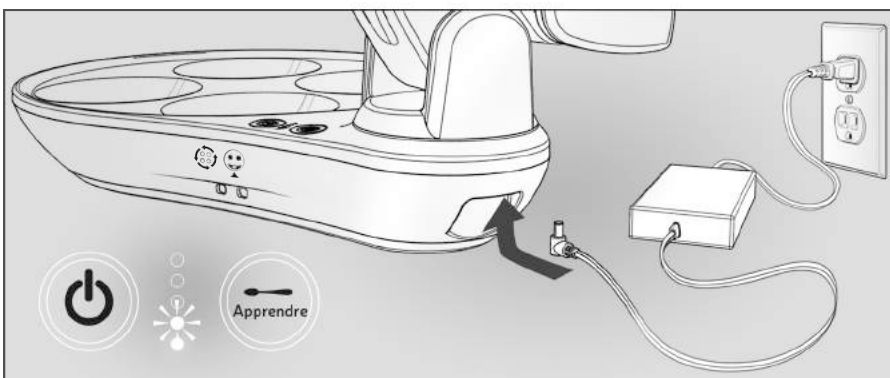

Connectez le câble de charge au port de charge Obi et à une prise électrique. Tous les voyants de la batterie s'allumeront lorsque l'appareil sera complètement chargé.

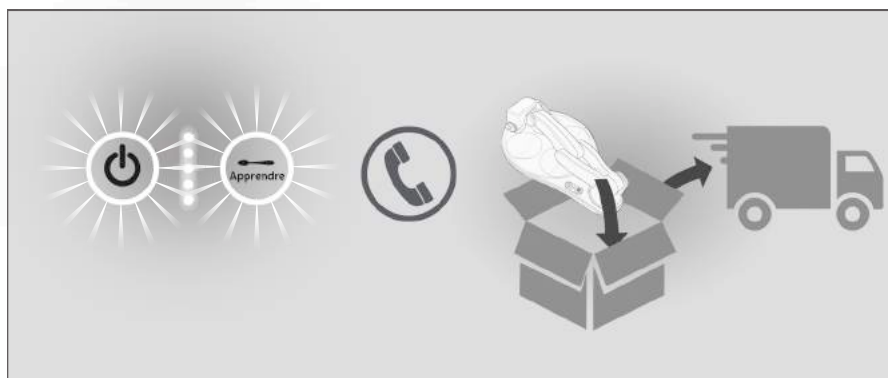

Si tous les voyants clignotent, éteignez-le pendant dix minutes. Ensuite, allumez Obi et si le problème persiste, appelez le 1-844-HelpObi. Si le problème ne peut pas être résolu par téléphone, le personnel agréé d'Obi organisera la réparation.